


Zur Verwendung als Zubehör bei der automatischen Registrierung und Lokalisierung während der computergestützten Therapie.

Nicht erneut sterilisieren. Erneutes Sterilisieren kann wirkungslos sein und die Genauigkeit beeinträchtigen.

Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist.

1. Kugel auf den Träger legen und herunterdrücken, bis sie eingerastet ist. (A)
2. Beschädigte oder verschmutzte Kugeln müssen vor Benutzung ausgewechselt werden.
3. Eine Kugel darf nicht ausgewechselt werden, während sich das Gerät im Körper des Patienten befindet.
4. Kugel zum Abnehmen nach oben ziehen. (B)

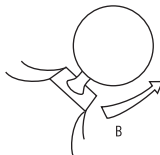

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO**CE**
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00