



NDI Passive Spheres™





作为一个附件，在计算机辅助治疗过程中帮助自动配准和定位。

不要重新消毒。

重新消毒可能失效，并且会影响精度。

如果消毒外包装有破损，请勿使用本装置。

1. 将小球放在安装台上，向下按直到卡到位。(A)
2. 如果反射面受损或受到杂质污染更换小球再使用。
3. 设备在患者体内时不要更换小球。
4. 若要除去小球，抓住底部，然后向上拉。(B)

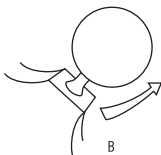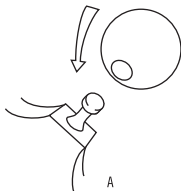

Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00